

Sani-Cloth HB Desinfektionstücher

Wir bieten Ihnen das einzige für **GE Ultraschall-Sonden** **validierte** Desinfektionsmittel. Sani-Cloth HB garantiert maximale Reduzierung von Infektionsgefahren und bietet gleichzeitig geprüfte Sicherheit für Ihre Ultraschall-Sonden.

Ihre Vorteile

Geprüfte Sicherheit für Ihre Sonden

- ✓ Getestet und validiert für GE Sonden
- ✓ Alkoholfrei*

Stark reduzierte Infektionsgefahr

- ✓ Bekämpft wirksam über 100 Mikroorganismen
- ✓ Ein Produkt für Reinigung und Desinfektion
- ✓ Klinisch getestet auf viruzide, fungizide und bakterizide Wirksamkeit
- ✓ Das erste gegen menschlichen Hepatitis B Virus wirksame, keimtötende Desinfektionstuch

✓ Einfache und praktische Handhabung

- ✓ Cellulose-Material des Tuches garantiert maximale Resistenz und Absorptionsfähigkeit
- ✓ Extra-große, ungefaltete Tücher zur effizienten Anwendung auch auf großen Flächen
- ✓ Kein Mischen oder Abmessen notwendig: Vorimprägniert mit keimtötender Lösung
- ✓ Vielseitig anwendbar: auf Sonden, Untersuchungstischen, Türklinken und anderen Oberflächen mit möglichen Infektionsrisiken
- ✓ Kein Austrocknen der Tücher: Große, leicht zu schließende Öffnung ermöglicht korrektes Schließen der Packung
- ✓ Kurze Anwendungsdauer



*enthält <0.15% Alkohol

Unverkäufliches Testmuster

Testen Sie jetzt!



imagination at work

Produktdetails

- ✓ Spender-Box mit 160 vorimprägnierten Desinfektionstüchern
- ✓ Abmessungen des Wischtuches 172 x 152 mm
- ✓ Wirksam unter anderem gegen Hepatitis B, HIV-1, Salmonella cholerasuis, Escherichia coli, Herpes Simplex Typ 2, MRSA (Mehicillinresistenter Staphylococcus aureus), Candida Albicans

Kompatibilität

- ✓ CE zertifiziert (CE0459)
- ✓ Zertifiziert nach den Richtlinien EN 1040, 1276 und 1275
- ✓ Validiert für GE Ultraschall-Sonden

Anwendungshinweise

Darf nicht zur abschließenden Sterilisation oder als hochwirksames Desinfektionsmittel für Oberflächen oder Instrumente, die a) in den Körper eingeführt werden oder b) in Kontakt mit dem Blutstrom, einschließlich offener Haut oder Schleimhaut kommen, benutzt werden. Sani-Cloth HP kann auch zur Vorreinigung oder Dekontaminierung von medizinischen Geräten vor Sterilisation oder hochwirksamer Desinfektion verwendet werden. Vorsicht: Nur zur äußeren Anwendung. Spezielle Hinweise für die Reinigung und Entfernung von HIV-1 und HBV-Viren von Oberflächen und Gegenständen, welche mit Blut oder anderen Flüssigkeiten verschmutzt sind: Persönliche Schutzmassnahmen: Beim Umgang mit Gegenständen, die mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten in Berührung gekommen sind, sind spezielle Schutzgegenstände wie Einweghandschuhe, Schutzmasken und/oder Schutzbrillen zu tragen. Reinigungsprozess: Vor dem Auftragen des Desinfektionsmittels müssen Oberflächen und Gegenstände gründlich von Blut und anderen Körperflüssigkeiten gereinigt werden. Einwirkzeiten: Bei Viren die Oberfläche für 1 Minute feucht halten (bei HBV und HIV1-Viren muss die Einwirkzeit auf 10 Minuten verlängert werden). Zur Bekämpfung von Schimmelpilzen und Moder ist die Oberfläche für 5 Minuten feucht zu halten.

Bestellen Sie jetzt!

- ✓ **Ja, ich möchte direkt bestellen (bitte gewünschte Anzahl angeben)** Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere AGB.

Artikel	Produktbeschreibung	Preis pro Box	Anzahl
1103055	Sani-Cloth Desinfektionstücher, Box mit 160 Tüchern	5,90 €	

Faxbestellung an

GE Healthcare
Accessories & Supplies
Medimex · Medicalis
Fax: 040 / 6588 6599

- ✓ **Ja, ich interessiere mich für das Sani-Cloth Desinfektionsmittel und bitte Sie um:**

- weitere Produktinformationen
 einen Besuch Ihres Außendienstes

Anmerkungen / Fragen: _____

Meine Adresse:

Krankenhaus _____ Abteilung _____

Name, Vorname _____

Straße _____ PLZ, Ort _____

Tel. _____ Fax _____

E-Mail _____ Datum, Unterschrift _____