

ES

D-125

Dental Suv

Limpiador odontológico superficial en base a vacío y ultrasonido

Empleo:

Para la desinfección de superficies rígidas no porosas, como por ej. ventanillas, bandejas para el instrumental, mesas de trabajo, suelos, muebles, camas, vehículos de transporte e instalaciones similares. Para la limpieza de superficies rígidas antes de la desinfección, limpieza de sistemas de conducción de vacío de odontología y para usar en los equipos de limpieza ultrasónicos. Para usar en áreas médicas, sanitarias y hospitalarias, en instalaciones sociales y en sanatorios para enfermos de tratamientos largos. Destruye una amplia gama de bacterias y de virus enquistados o no enquistados (HIV-1, HHBV y HCV incluidos). Cloruro de amonio de alchilidimetilbenzeno: 23,77 g/l. Cloruro de amonio de alchilidimetiltilbenzeno: 23,77 g/l. <5% tensioactivos no iónicos, etilendiamino tetraacetato (EDTA) y sus sales, tensioactivos catiónicos

Mezclado y utilización de diluciones:

Vierta 1,6% ó 80 ml. del D-125 en 5 litros de agua. (1:64). Elimine primero la suciedad basta o la inmundicia. En el caso de áreas muy sucias es necesario realizar una limpieza previa. Deje actuar la solución sobre todas las superficies mojadas durante 10 minutos. Dejar que se seque al aire. Preparar una nueva solución para cada limpieza.

Almacenamiento y eliminación:

No guardarlo en el lugar donde se utiliza. Evite el crespado y efecto sobre paredes. Concentrado líquido. Almacenarlo en los recipientes originales cerrados en un sitio oscuro, fresco pero sin peligro de heladas. La aplicabilidad en el caso de almacenamiento asciende a 12 meses si no ha sido abierto. Si el producto se congela, déjalo descongelar a temperatura ambiente y sacudirlo ligeramente para que los diferentes componentes vuelvan a mezclarse. Almacenarlo en sitios cerrados, colocándolo en lugares donde no haya peligro de ser afectado por otros productos biológicos, fertilizantes, comestibles y forrajes. Los niños no debieran tener acceso a los depósitos de almacenamiento cerrados con llave. No contamine ni el agua, ni comestibles ni forrajes al almacenarlo o al eliminarlo. No vierta ningún líquido que contenga este producto en lagos, arroyos, lagunas, desembocaduras de ríos, océanos u otras aguas. No vierta ningún líquido que contenga este producto en cloacas/canalizaciones sin haber informado antes a la

autoridad competente para la evacuación de aguas. No utilice de nuevo los recipientes vacíos.

Efectividad:

La efectividad fue demostrada en el caso de organismos comunes con 5% de suciedad orgánica del suelo con 400 PPM de agua calcárea; salvo que en la etiqueta se indique otra cosa.

Los organismos más importantes sobre los que el producto hace efecto:

Human Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, HIV - 1 (AIDS Virus), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Enterococcus hirae, Trichophyton mentagrophytes (hongos patógenos), Escherichia coli, Herpes Simplex type 2 virus, Poliotipo 1 (virus gatuno) 30 minutos de tiempo de contacto. Influenza A/Victoria (H3N2) Virus. *En 98 % de carga en el suelo y 791 ppm de agua calcárea fue demostrado un efecto en el interin de 10 minutos contra las bacterias que producen las infecciones de estafilococcus aureus y salmonelas.

Tipos de producto (PT): 02



Irritante
Irrita los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Microgen-Europe B.V.,
Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam.
Tel.: +31 205 214 - 777,
Fax: +31 205 214 - 888

Número de lote:

0,5 l



MICROGEN-EUROPE BV

Disinfectant Products, Redefining Clean




PANTONE
259c



PANTONE
2602c



PANTONE
151c

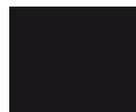

PANTONE
Black c